



RÉALISATION ET POSE DES TAQUETS

Nous recommandons de ne pas dépasser 2 à 3 taquets à la fois.

Matériel Requis



Lampe à photopolymériser (J02130)



Gouttières de transfert



Vaseline



Acide du mordantage (ECM8075)



Résine composite (J04000)



Résine composite fluide (J04004)

1



Essayer le premier aligneur avant le collage des dents

2



Identifier l'emplacement des taquets

3



Appliquez le produit de mordantage sur la zone de la dent ou le taquet doit être collé.

4



Rincer

5



Préparer l'aligneur de transfert en couvrant très légèrement les trous du taquet avec de la vaseline.

6



Remplir environ 2/3 de l'emplacement du taquet avec de la résine composite en pâte

7



Remplir le 1/3 restant de l'emplacement avec de la résine composite fluide

8



Placer la résine de collage sur la dent mordancée, et polymériser

9



Insérer l'aligneur de transfert

10



Photopolymériser la résine composite en faisant mordre un coton au patient

11



Éliminer l'excédent